

Handleiding KMD ToGo 11



KMD maakt mensen met
een functiebeperking
zelfstandiger

Inhoud

5 Algemeen

- 5 Inleiding
- 5 Kennismaking met de ToGo 11
- 5 ToGo 11 aanzetten
- 6 Schoonmaken
- 6 Opladen

7 Bediening ToGo 11

- 7 Touchscreen
- 7 Raster

8 Dynamische inhoud ToGo 11

- 8 Bladen
- 8 Bladen verzenden

10 Spraak synthese

- 10 De synthesizer
- 10 Letterkaart
- 10 Woordvoorspelling
- 11 Zinnen opslaan



11 Menu activeren

12 Spraak

- 12 Spraak opnemen
- 14 Spraak onder een verwijzer
- 15 Opname wissen

17 Menu bediening

- 17 Touchscreen

18 Menu beeld

- 18 Display
- 19 Selectie

20 Menu geluid

- 20 Opname
- 20 Synthesizer
- 22 Geluiden

22 Menu diversen

- 22 Instellingen

- 23 Teamviewer
- 24 Foto menu
- 25 Menu multimedia
- 25 Mp3 importeren
- 26 Menu info
- 26 Licentie info

27 KMD Create ToGo

- 27 Aangepaste set opslaan
- 28 Terug naar mijn bladenset zonder op te slaan
- 28 Nieuw blad toevoegen
- 28 Achtergrondkleur blad veranderen
- 29 Bladverwijzer toevoegen
- 30 Afbeelding toevoegen
- 32 Symbool toevoegen
- 33 Tekst toevoegen
- 34 Thema toepassen op een vak
- 35 Thema toepassen op een hele pagina

- 35 Vak dupliceren
- 36 Vak wissen
- 37 Spraakopname maken
- 38 Verwijzervak bewerken
- 39 Vak verslepen
- 40 Ander blad kiezen

41 Service toegang

42 Ondersteuning door KMD

- 42 Service
- 42 Bereikbaarheid
- 42 Voorwaarden handleiding



Algemeen

Inleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de ToGo 11 van KMD.

Met de ToGo 11 heeft u een hoogwaardig hulpmiddel voor communicatie en computerbediening tot uw beschikking. De ToGo 11 valt onder de categorie dynamische communicatiehulpmiddelen. De ToGo 11 is uiterst robuust en breed inzetbaar. Deze handleiding helpt u bij het gebruik, de inrichting en aanpassing van de ToGo 11 aan uw situatie. Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan kunt u terecht op www.kmd.nl of ons telefonisch benaderen. Wij helpen u graag verder.


Kennismaking met de ToGo 11

KMD heeft de ToGo 11 speciaal voor een brede doelgroep ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met het ontwikkelen en leveren van hulpmiddelen aan mensen met een functiebeperking. De ToGo 11 is in elk detail met deze gedachte opgezet. De ToGo 11 biedt de functionaliteit die nodig is om een breed scala aan functiebeperkingen te compenseren. Het hulpmiddel kan worden ingezet als communicatiehulpmiddel met ingesproken

of synthetische spraak en als computerbediening.

De ToGo 11 kan in diverse uitvoeringen worden geleverd zodat het hulpmiddel altijd naadloos aansluit op uw behoefte. Uitbreiding met extra functionaliteiten is altijd mogelijk. Ook heeft KMD uitgebreide mogelijkheden om uw hulpmiddel te monteren op rolstoel of bed.

ToGo 11 aanzetten

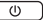
Als de ToGo 11 is uitgeschakeld kunt u met de aan/uit toets de ToGo 11 aanzetten. Hiervoor moet u de  knop een keer ingedrukt houden.



HANDLEIDING - KMD TOGO 11

De ToGo 11 schakelt na enige tijd over op standby als u hem niet gebruikt. In deze standby modus verbruikt de ToGo 11 minimaal energie.

U kunt dan de ToGo 11 weer activeren door op de menu toets te drukken.

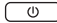U kunt de ToGo 11 ook geforceerd afsluiten in plaats van standby. Houd de Aan-uit  knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de ToGo 11 uit te schakelen. En schuif het scherm naar beneden om af te sluiten.

6

Schoonmaken

Door gebruik kan het beeldscherm van de ToGo 11 vuil worden. De ToGo 11 kunt u het beste schoonmaken met een droge microvezel doek. Er mag ook gebruik worden



gemaakt van glasreiniger. Spuit de glasreiniger altijd op het doek en nooit op het scherm. Het is belangrijk dat na het opspuiten, de glasreiniger direct wordt afgedroogd. Het gebruik van chemische middelen en sterke schoonmaakmiddelen tast het beeldscherm van de ToGo 11 aan.



Opladen

Om de ToGo 11 te kunnen gebruiken dient de interne accu te zijn opgeladen of is de oplader aangesloten.

De oplader van de ToGo 11 kan op 2 manieren aangesloten worden. De ToGo 11 is voorzien van accu's welke zelf regelen wanneer ze opladen en hoe lang ze opladen. Er wordt geadviseerd om de ToGo 11 elke avond aan de



oplader te leggen, zodat deze altijd voldoende accu-capaciteit heeft om de volgende dag de hele dag te kunnen gebruiken. Doordat de accu's zelf het opladen reguleren worden de accu's ook niet slapper of lui door te vaak opladen en hoeft u de accu's ook nooit helemaal leeg te laten gaan.

Bediening ToGo 11

Touchscreen

De ToGo 11 heeft een dynamische inhoud die kan worden bediend met het touchscreen.

De indeling van de schermen (aantal en grootte van de vakken) en de inhoud van de vakken kan ingesteld worden met de bijgeleverde KMD Create software. Voor details verwijzen we u naar de KMD Create handleiding. Voor het touchscreen kan de snelheid van reageren, de noodzakelijke duur van aanraken en de herhaling aangepast worden aan de individuele gebruiker waardoor het touchscreen breed inzetbaar is.

Raster

Voor gebruikers waarbij de coördinatie beperkt is en/of die moeite hebben met het direct aanraken van het juiste vak kan een raster aangebracht worden. Dit raster is gemaakt van lexan. Het raster kan op de individuele wensen van de gebruiker aangepast worden. De hoeveelheid van de vakken, de grootte van de vakken en de vorm van de vakken kunnen in overleg bepaald worden. ■

Dynamische inhoud ToGo 11

Bladen

De inhoud van de ToGo 11 is dynamisch, wat betekent dat de inhoud aangepast kan worden aan de individuele gebruiker en kan meegroeien met de ontwikkeling van de gebruiker.


Om de inhoud van de ToGo 11 geschikt te maken voor de gebruiker wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de behoeftes. Deze inventarisatie wordt meestal in samenwerking met de logopediste of ergotherapeut gemaakt.

Bij aflevering van de ToGo 11 zit er een op de gebruiker aangepaste bladenset in de ToGo 11 die met behulp van het meegeleverde programma KMD Create verder aangepast kan worden aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. De werking van KMD Create wordt in een aparte handleiding uitgelegd.

De set bladen wordt overgezet op de ToGo 11 met behulp van de bijgeleverde USB stick.

Bladen verzenden

De bladen zijn met KMD Create op de USB stick gezet. De USB-stick wordt in de USB-aansluiting gestoken zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

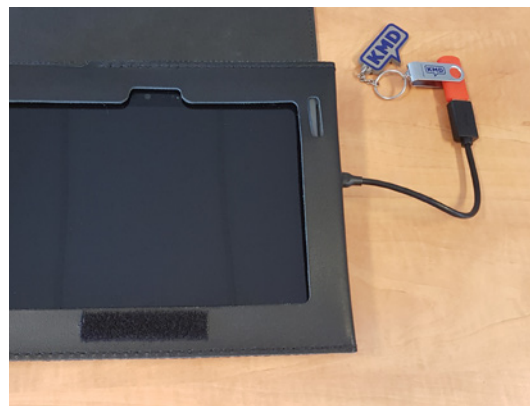



Uitgebreid menu

Spraak opname

Opname wissen

 **Verwijzer niet actief bij opname en bij wissen van vak**

KMDCreate USB Stick
Laad bladenset "Kernvocabulaire + ALS" met 226 bladen van USB Stick

Type:T3 To Go 11" XL
ToGo versie: 4.8 Fix 1
Build Date 29-11-2018 10:23:38
TAG : 58MCP72
ExpressCode: 114-051-851-66

ok

Als de USB stick is aangesloten kunt u het menu activeren. Het menu wordt geactiveerd door een van de twee volumeknoppen ingedrukt te houden totdat de gekleurde cirkel helemaal rond is. Hierna zal in het beeldscherm een menu verschijnen. Druk nu op de knop "Laad bladenset van USB Stick". Deze knop is groen als de juiste formaat bladenset wordt aangeboden.

De bladen worden nu automatisch vanaf de USB stick in de ToGo 11 gezet. De aangepaste bladenset wordt nu geladen op de ToGo 11'. De bladen staan nu in het apparaat, en de USB stick kan verwijderd worden. ■



Spraak synthese

De synthesizer


Naast opgenomen spraak kan de ToGo 11 ook geleverd worden met synthesizer. Hiermee kan de gebruiker door middel van voorgeprogrammeerde boodschappen of een letterkaart zelf woorden en zinnen maken, zonder beperkingen van vooraf ingesproken pictogrammen. Deze woorden en zinnen worden dan uitgesproken door de synthesizer. De synthesizer heeft een mannen-, vrouwen-, of kinderstem. De ToGo 11 is uitgerust met een Acapela synthesizer, dat de ToGo 11 een warme en aangename stem geeft.

De optie voor een synthesizer zit niet standaard in de ToGo 11, maar kan indien noodzakelijk altijd achteraf geactiveerd worden.

Letterkaart

Een letterkaart is een blad waarop het alfabet in vakjes staat. Dit kan in de voor de computer gebruikelijke Qwerty indeling maar ook in elke andere gewenste indeling.

De letters worden één voor één aangetikt en in een verzamelregel wordt een woord gevormd. Tevens is er de

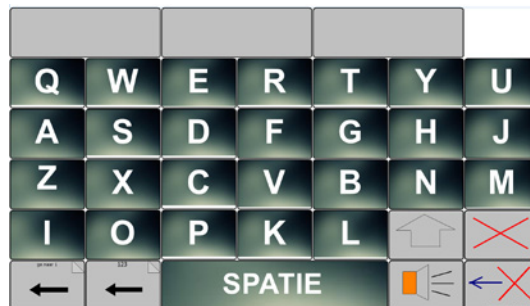

mogelijkheid spaties en leestekens toe te voegen, waardoor hele zinnen en boodschappen geproduceerd kunnen worden. Letterkaarten en de bijbehorende functies kunnen aangemaakt worden in KMD Create (zie handleiding KMDCreate). Voor het uitspreken van gevormde woorden en zinnen is de synthesizer noodzakelijk.

Woordvoorspelling

In de letterkaart bestaat de optie voor woordvoorspelling. Bij het selecteren van 1 of meerdere letters komen in de woordvoorspellingsvakken mogelijke woorden te staan. Een woord kan geselecteerd worden door het betreffende vak aan te tikken.

Om woordvoorspelling mogelijk te maken, dienen 1 tot 8 speciale vakken aangemaakt te worden welke in de KMD Create software een woordvoorspellingsfunctie toegewezen krijgen. De optie woordvoorspelling moet tevens aangezet worden in het menu van de ToGo 11.

Zinnen opslaan

In de letterkaart bestaat tevens de mogelijkheid om zinnen op te slaan. Hiermee kan de gebruiker een gesprek voorbereiden of veelgebruikte zinnen opslaan waarmee veel tijd bespaart wordt. Om zinnen op te slaan dient in KMD Create een vak aangemaakt worden voor het opslaan van zinnen en een vak voor het terughalen van opgeslagen zinnen (zie handleiding KMDCreate). Wanneer deze twee vakken zijn aangemaakt en in de ToGo 11 zijn gezet kan onder alle letter-, en cijfervakken een zin opgeslagen worden. ■

Menu activeren

Om het menu te activeren dient u een van de twee volumeknoppen die zich aan de bovenkant van de ToGo 11 bevinden voor enkele seconden ingedrukt te houden. Houd de knop ingedrukt totdat de gekleurde cirkel helemaal rond is.



HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Hierna verschijnt het volgende menu scherm:



12


Hierin kiest u 'Spraak opname' als u de ToGo 11 wilt gaan inspreken of 'Spraak wissen' als u voorheen opgenomen spraak weer wilt verwijderen.

Deze twee handelingen worden hierna uitgebreid beschreven. Voor het verder afstemmen van de ToGo 11 op uw wensen kiest u de knop 'Uitgebreid menu'. U komt dan in een menu waarmee u een breed scala aan ToGo 11 eigenschappen kunt instellen. Voor details over dit menu, zie verder in dit document. Door het indrukken van de 'Ok' knop verlaat u het menu en gaat u terug naar de normale bladenset. ■

Spraak

Spraak opnemen


De inhoud van de ToGo 11 moet na aflevering en aanpassing worden voorzien van spraak. Dit doet u door naar het menu te gaan. Vervolgens drukt u op de toets spraakopname.

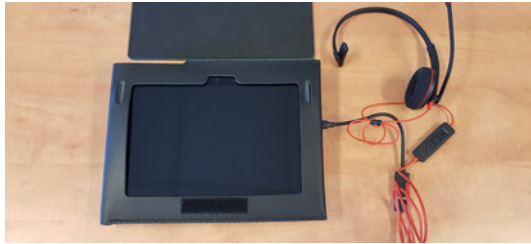

Wanneer u de headset hebt aangesloten tikt u “OK” en belandt u in de bladenset die in de ToGo 11 zit. Ga daarna naar het blad, waarop spraak moet worden opgenomen.




Druk op het vak, waaronder spraak moet worden opgenomen.

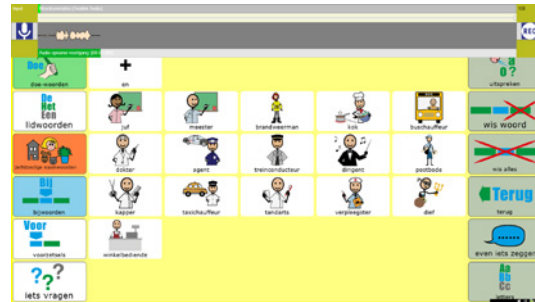

Spreek nu de gewenste boodschap van het vak in en druk vervolgens nogmaals op hetzelfde vak om de spraakopname te stoppen. De opgenomen spraak kan direct na opname worden afgespeeld ter controle.

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

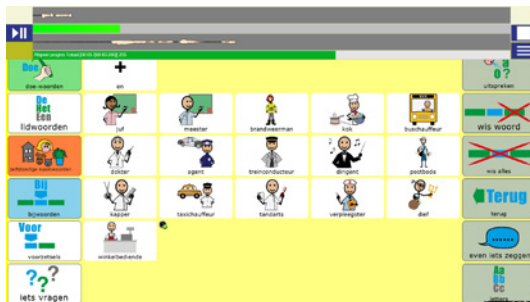


14

Klaar met inspreken? Ga met behulp van de volume toets naar het menu. Selecteer vervolgens 'Ok' of 'Spraak opname stoppen' om dit menu te verlaten en terug te gaan naar de bladenset.

Spraak onder een verwijzer

De spraak kan onder bijna alle toetsen worden opgenomen. Dus ook onder lettertoetsen, computertoetsen, verwijzers etc. In de spraak opname stand zijn de verwijzers echter op de normale manier actief; bij selectie van een vakje met een verwijzer wordt er van blad gewisseld en dus geen audio opgenomen. Wanneer u spraak onder een verwijzer wilt opnemen dient u in onderstaand menu de optie 'Verwijzer uit bij opname, en bij wissen

van vak' aan te vinken en de knop spraak opname aan te tikken.

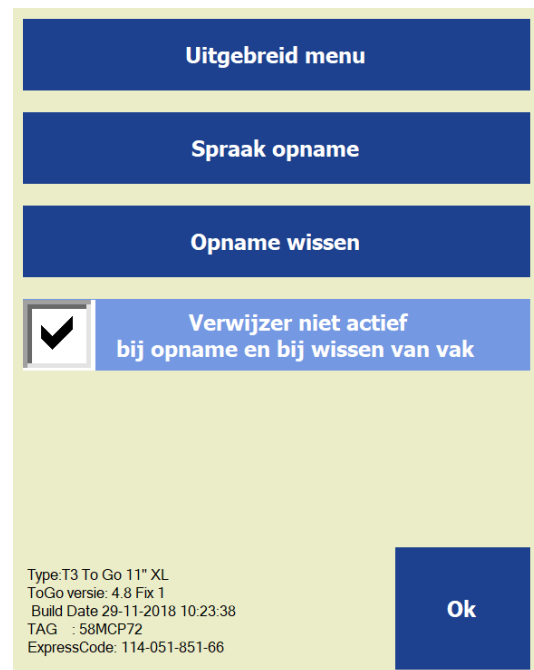

Type: T3 To Go 11" XL
ToGo versie: 4.8 Fix 1
Build Date 29-11-2018 10:23:38
TAG : 58MCP72
ExpressCode: 114-051-851-66

Ok

De procedure voor het spraak opnemen is dan hetzelfde als hiervoor beschreven. De verwijzers in de bladenset staan echter uit, waardoor er niet van bladen gewisseld kan worden.


Wanneer u klaar bent met spraak opnemen opent u het menu op de ToGo 11 en dient u de optie “Verwijzer uit bij opname, en bij wissen van vak” uit te vinken voordat u “Ok” of “Spraak opname stoppen” intoetst.

Opname wissen

Wanneer u opnieuw spraak wilt opnemen over bestaande spraak, hoeft u niet eerst de oude spraak te wissen. U kunt dan gewoon de procedure van spraak opnemen volgen.


De ToGo 11 overschrijft automatisch de oude spraak voor de nieuw opgenomen spraak.

Wanneer u echter spraak heeft opgenomen op een verkeerd vak of een spraakopname geheel wilt wissen kunt u dit doen middels de knop spraak wissen in het menu.

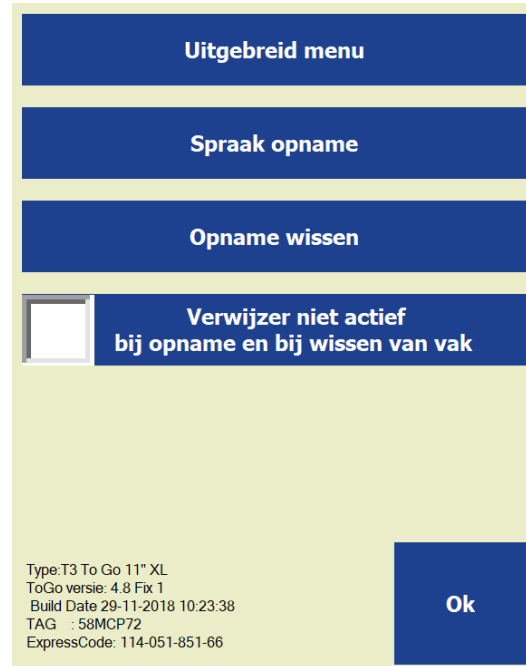


HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Vervolgens kiest u de optie “Spraak wissen”. De ToGo 11 springt nu automatisch naar de bladenset. In de bladenset ziet u op de vakken waar spraak opgenomen een icoontje staan van een spraakbestand.

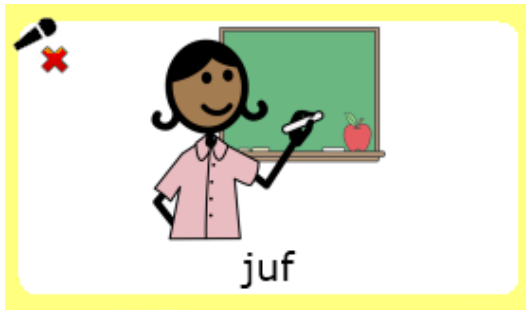

16

U kunt een spraakbestand wissen door het betreffende vakje aan te tikken, er verschijnt vervolgens een venster waarin u kunt kiezen uit nee (annuleren) en ja (spraak wissen).

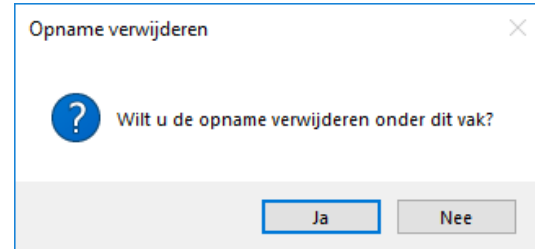

Wanneer u klaar bent met het wissen van spraak, ga met behulp van de Menu toets in het Menu, bevestigen met “Ok” om af te sluiten.

Het wissen van spraakbestanden onder verwijzers werkt hetzelfde als spraakbestanden opnemen onder verwijzers.

De optie ‘verwijzer niet actief bij opname en bij wissen van vak’ moet aangevinkt zijn voor er spraak gewist kan worden en deze moet weer uitgezet worden na het wissen van spraak.

Let op! De verwijzers in de bladenset werken niet wanneer de optie geen verwijzer is aangevinkt. U dient op het juiste blad te staan voordat u het menu in gaat. ■

Menu bediening



Touchscreen

Touchscreen reactietijd (0.01-10 sec.)

Na het indrukken van een vak op de ToGo 11 zal de ToGo 11 een vooraf ingestelde tijd wachten met het uitvoeren van de onderliggende actie. Met het instellen van deze tijd kan worden voorkomen dat acties onbedoeld worden geactiveerd.

Touchscreen begin herhaaltijd (0.1-10 sec.)

Door het ingedrukt houden van een vak kan de actie die

wordt uitgevoerd worden herhaald. Met deze instelling kan de tijd die wordt gewacht voordat het herhalen begint worden ingesteld. Hiermee kan worden voorkomen dat onbedoeld acties worden herhaald.

Touchscreen herhaaltijd (1-10 sec.)

Door het ingedrukt houden van een vak kan de actie die wordt uitgevoerd meerdere malen worden herhaald. Met deze instelling kan de snelheid waarmee de herhalingen elkaar opvolgen worden ingesteld.

Touchscreen wacht tot los tijd (0.1-10 sec.)

Met deze tijd kan worden ingesteld dat de ToGo 11 het vak ontkoppeld, ongeacht of de gebruiker het vak nog aanraakt of niet. Dit kan voorkomen dat acties onbedoeld herhaald worden, bijvoorbeeld bij gebruikers die het vak niet bewust kunnen loslaten.

Touchscreen wacht tot los tijd bij geen reactie tijd (0-10 sec)

Wanneer 'touchscreen reactietijd' 0 is, wordt deze tijd gebruikt voor het loslaten.

Touchscreen tik geluid /touchscreen volume tik


Bij deze optie is er een mogelijkheid om een tik te laten horen bij het activeren van een vak. De geluidsterkte kan met de pijltjes worden ingesteld. Er wordt geen tik gegeven bij een vak waar spraak onder is opgenomen.

Zonder acties niet selecteerbaar optie

Door het aanvinken van 'Vakken zonder acties niet selecteerbaar' zal er bij het drukken op een vakje zonder bijbehorende acties geen selectiekader zichtbaar worden. Deze optie is vooral nuttig bij bladen die gebruikt worden voor omgevingsbediening. Deze optie is niet beschikbaar bij de ToGo 11. ■

Tijd display maximaal aan (65 - 540 sec.)

De tijd dat het display op maximale sterkte blijft branden. Deze maximale lichtsterkte kan gekozen worden uit het bereik 5 - 100%.

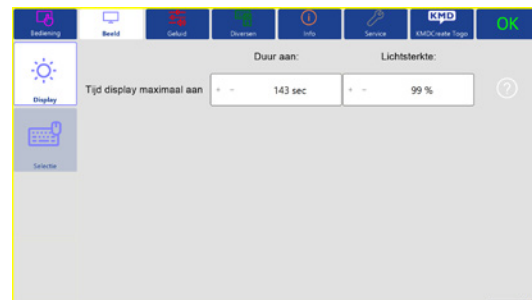


Menu beeld

Display

Wanneer er een tijdje geen gebruik wordt gemaakt van de ToGo 11, zal de stand-by stand van de ToGo 11 ingeschakeld worden.

De verlichting van de ToGo 11 wordt uitgeschakeld, waarna de ToGo 11 de stand-by stand inschakelt.

In verband met de accu duur wordt u aangeraden deze tijd kort te houden en de bijbehorende lichtsterkte te beperken.

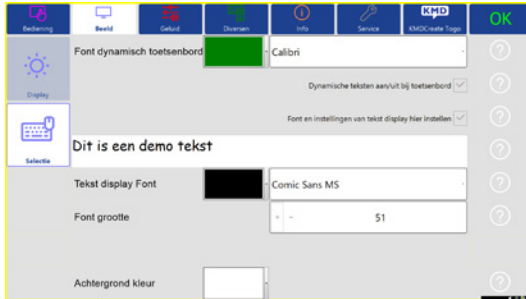

Selectie

Bij het selecteren van vakken geeft de ToGo 11 een gekleurd kader om de betreffende vakken. Zowel de kleur van dit kader als de dikte van dit kader is in te stellen.

Raak het gekleurde vak aan om de kleur aan te kunnen passen. Er verschijnt dan een pop up scherm met voor gedefinieerde kleuren, deze kunnen geselecteerd worden. Tevens bestaat er de mogelijkheid om zelf een kleur te definiëren middels de toets definiëren.

Bevestigen met “ok” om de gekozen kleur te activeren.

Dynamische teksten aan/uit bij toetsenbord

Zet het dynamische toetsenbord aan of uit.

Font en instellingen van tekst display hier instellen

Gebruik de instellingen die hier zijn ingesteld in plaats van de ingestelde waarden van KMDCreate.

Tekst display Font

De kleur waarmee het geselecteerde vak wordt omlind en het lettertype waarmee de tekst weergegeven wordt. Dit is van toepassing bij het gebruik van het touchscreen.

Font grootte

De grootte waarin de tekst weergegeven wordt. De font grootte kan tussen 8 en 100 ingesteld worden.

Achtergrond kleur

De achtergrond kleur is de kleur die achter de tekst wordt weergegeven. Raak het gekleurde vak aan om de kleur aan te kunnen passen. Er verschijnt dan een pop up scherm met voorgedefinieerde kleuren, deze kunnen geselecteerd worden. Tevens bestaat er de mogelijkheid om zelf een kleur te definiëren middels de toets definiëren.

Bevestigen met “ok” om de gekozen kleur te activeren. ■

Menu geluid

Opname

Volume (0-100%)

Hiermee kan het volume van de ToGo 11 ingesteld worden tot het maximale volume.

Volume Max (0-100%)


Hiermee kan het maximale volume van de ToGo 11 ingesteld worden.

Selecteer het standaard afspeel apparaat

Met deze optie kunnen er verschillende output speakers geselecteerd worden indien er een externe luidspreker gebruikt wordt. Bij de standaard instellingen zijn de speakers van de ToGo 11 toegepast.

Speaker wake up

De wake up is een (onhoorbaar) geluid die afgespeeld kan worden op een bluetooth speaker wakker te houden. De meeste bluetooth speakers hebben namelijk de eigenschap na een aantal minuten zonder geluid zichzelf uit te schakelen. Deze functie voorkomt dat. Druk op OK om de nieuwe instellingen te activeren.

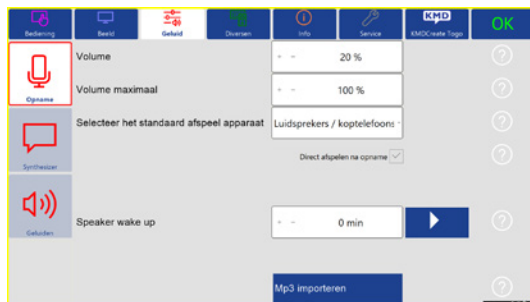

Synthesizer


Met dit menu stelt u de eigenschappen in van de 1e synthesizer stem.

Volume synthesizer (20-400)

Hiermee kan het volume van de synthesizer ingesteld worden. Standaard waarde is 100.

Gemiddelde snelheid (30 - 200)

Hiermee kan de spreeknelheid van de synthesizer aangepast worden. Standaard waarde is 100.

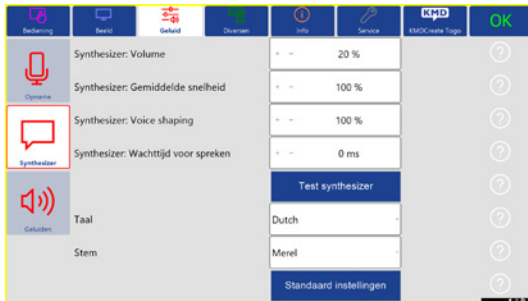

Voice shaping (70-140)

Hiermee kan het profiel van de stem aangepast worden. Standaard waarde is 100. Lagere waardes maken de stem zwaarder, terwijl waardes boven de 100 resulteren in een hogere stem.

Taal

De taal van de synthesizer is hier instelbaar. Standaard is de ToGo 11 voorzien van een Nederlandse synthesizerstem. Indien gewenst zijn er tevens andere talen beschikbaar.

Stem

Hier kan worden ingesteld of de synthesizer met een mannelijke of vrouwelijke stem spreekt. Bij de Nederlandse Acapela synthesizer is Daan de mannenstem en Jasmijn de vrouwenstem. Ook kan er een jongens en een meisjesstem ingesteld worden (kinderstemmen). Deze hetten Thijs en Merel.

Test synthesizer

Met deze knop spreekt de ToGo 11 een standaard zin uit waarmee de instellingen van de synthesizer getest kunnen worden.


Standaard synthesizer instellingen

Met deze knop worden alle instellingen van de synthesizer teruggezet naar standaard instellingen. Druk op OK om de nieuwe instellingen te bevestigen.



Geluiden

Bij dit venster kunnen verschillende geluiden toegevoegd worden bij bepaalde acties, zoals het aantikken van een vak. Hierbij kan ook het volume aangegeven worden (0-100%) ■

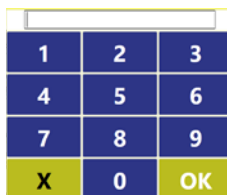

Menu diversen



Instellingen

Toegangscode voor menu

Het menu kan met een pincode worden beveiligd. Om de code te activeren moet het vakje voor 'Toegangscode voor menu' worden aangevinkt. De toegangscode voor het menu is altijd "3491", gevolgd door "OK". Deze code kan niet worden gewijzigd.

Menu knop

De menu knop aan of uit zetten. Tevens kan er ingesteld worden hoe lang de menu knop ingedrukt gehouden moet worden voordat het menu venster wordt weergegeven.

Woordvoorspelling (ToGo 11 opnieuw opstarten)

Zet woordvoorspelling aan/uit, bij aan- of uitzetten de ToGo 11 opnieuw opstarten.

Woord vervoegen


Hierdoor worden woorden vervoegd indien dit als actie onder een vak staat. Ook kan er worden gekozen om het vervoegde woord direct uit te spreken en in de leesregel te plaatsen.

Instellingen resetten

Met deze knop worden alle menu instellingen teruggezet naar fabrieksinstellingen. Bij het activeren van deze knop wordt eerst een bevestiging gevraagd om ongewenst resetten te voorkomen.


Teamviewer

Na contact met onze service afdeling kan er gevraagd worden om de ToGo 11 op afstand over te nemen. Dit kan gedaan worden door op de Teamviewer knop te drukken.

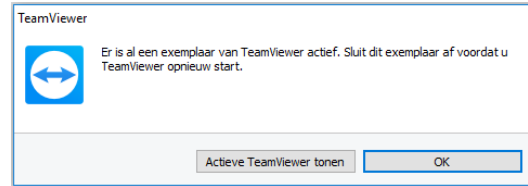


Kies vervolgens “Activeer Teamviewer tonen”

En geef uw ID door. Hierna zal een service medewerker u verder begeleiden.

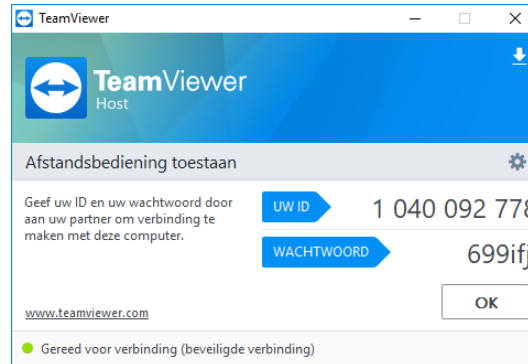

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

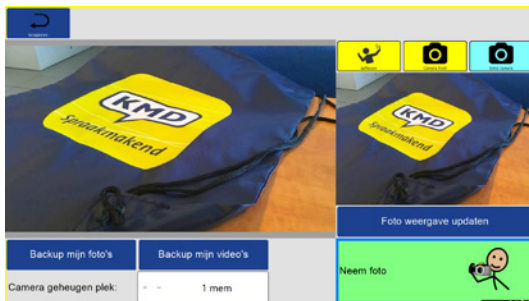

24

Foto menu

Camera Selfie, front en Extra Camera

Met deze knop "SelfieCam" en "Camera front" en "Extra Camera" kan er gewisseld worden van camera.

Camera Geheugen plek


Kies hier de geheugen plek die gebruikt moet worden. Met "Foto weergave updaten" kan gekeken worden welke foto in het geheugen staat. Als er nog geen foto op de geheugen plek staat zal er een standaard foto getoond worden met de tekst "no image available"

Neem foto

Met de groene foto knop kan een foto gemaakt worden op de gekozen geheugen plek.

Backup mijn foto's

Backup de foto's en tekeningen die op de ToGo 11 zijn opgeslagen op een USBstick. Bij een juiste backup staan deze opgeslagen op de USBstick in de map: "\KMD\SC-123....\Foto\"

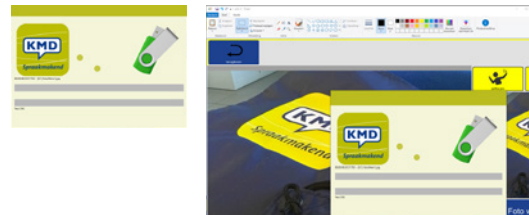


Backup mijn video's

Backup de opgenomen video's die op de ToGo 11 zijn opgeslagen op een USBstick. Bij een juiste backup staan deze opgeslagen op de USB stick in de map: "\KMD\SC-123....\Video\"

Menu multimedia

In het menu kun je .mp4 bestanden op de ToGo 11 plaatsen. Met de groene foto knop kan een video bestand in een multimedia geheugen plek geplaatst worden.

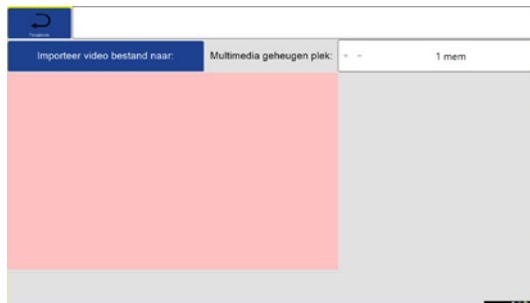

Mp3 importeren

Let op, bij deze actie wordt reeds opgenomen spraak overschreven!

Plaats de USB stick met mp3 geluidsbestanden. Open daarna het menu en ga naar Geluid en kies voor het kopje



Opname. Hier heb je de optie MP3 importeren. Zodra je daarvoor gekozen heb kom je terug in de bladenset. Hier tik je op het vak waar je de MP3 onder wilt hebben. Kies in de linker balk voor je bestand. Deze kun je eerst nog terug luisteren.

Wanneer het juiste geluid bestand gekozen is druk weer op het vak. Nu wordt maximaal 60 sec van het Mp3 geluidsbestand geïmporteerd.

Menu Info

Informatie over de hardware, software, licentie en accu welke aanwezig zijn in de ToGo 11. Hier kunnen medewerkers van KMD belangrijke informatie uitlezen over het functioneren van uw ToGo 11.




Ik doe het
zelf

Licentie info

Informatie over de gebruiker en apparaat, de zorgverzekeraar en de licenties die aanwezig zijn in de ToGo 11. ■

KMD Create ToGo

KMD Create ToGo is een vereenvoudigde versie van KMD Create op de PC. Met KMD Create ToGo kunt u snelle aanpassingen toebrengen en foto's toevoegen. Sluit eerst de rode USB stick aan en klik op 'Start KMD Create Togo' om te beginnen.

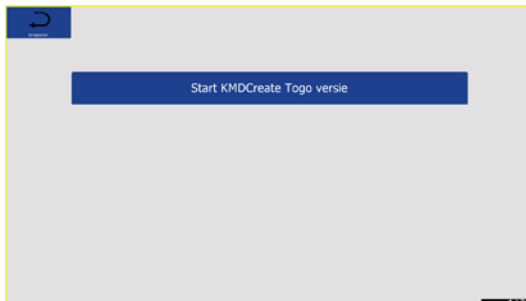


Create Togo opent nu op de laatst bezochte pagina. In de bovenste balk worden de verschillende opties weergegeven om de bladenset aan te passen. De opties zijn vergelijkbaar met de opties uit KMD Create.



Aangepaste set opslaan



Als u in de bovenste rij het 'T3 ToGo' icoon aanklikt ziet u het volgende scherm verschijnen.

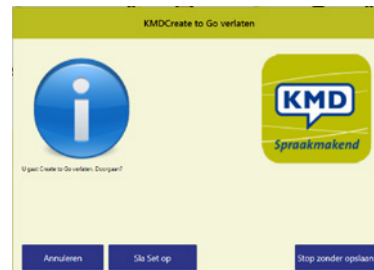

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Klik op 'Sla set op'. De huidige aanpassingen worden toegepast op de bladenset en nieuwe versie van de bladenset wordt opgeslagen op de USB stick. Vervolgens keert u terug naar de (nu aangepaste) bladenset met het startmenu.

Terug naar mijn bladenset zonder op te slaan



Als u in de bovenste rij het 'T3 ToGo' icoon aanklikt ziet u het volgende scherm verschijnen.




Klik op 'Stop zonder opslaan'. Bij deze optie gaat u weer terug naar de huidige bladenset. De aanpassingen die u in Create Togo hebt gemaakt, zijn niet toegepast. Zodra u teruggaat naar Create Togo zijn de eerder gemaakte aanpassingen gewist.

Nieuw blad toevoegen



Bij het indrukken van het icoon 'nieuw blad' wordt er een nieuw blad toegevoegd aan de bladenset.

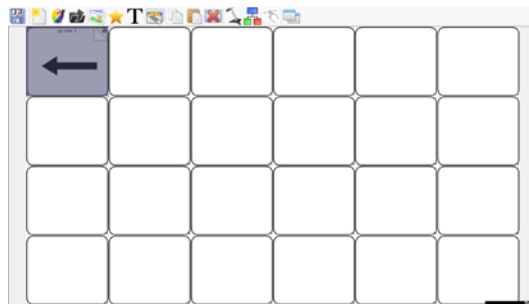


Achtergrondkleur blad veranderen



Om de achtergrondkleur van het blad te veranderen, klikt u op het icoon 'achtergrondkleur blad'. Er verschijnt een pop up scherm met voorgedefinieerde kleuren.


Tevens bestaat er de mogelijkheid om zelf een kleur te definiëren middels de toets definiëren. Selecteer de gewenste kleur en klik vervolgens op 'OK' om de gekozen kleur toe te passen.

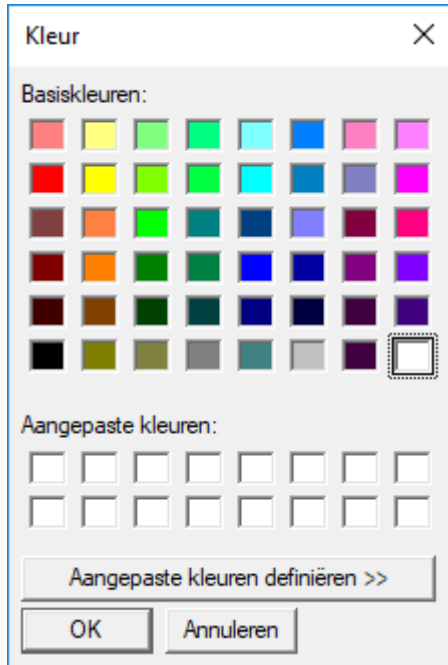

Bladverwijzer toevoegen



Selecteer een vak waar u een verwijzer onder wilt plaatsen. Klik vervolgens op het icoon 'bladverwijzer invoegen'. Vervolgens krijgt u een venster waarin alle bladen staan weergegeven, zoals hieronder.

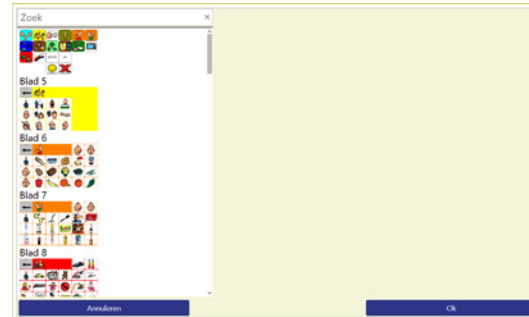

Om het gewenste blad te zoeken, kunt u in de zoekbalk bovenaan de naam van het blad intypen of u kunt door de bladen heen scrollen om het gewenste blad te vinden.

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Selecteer het blad waar u naar wilt verwijzen. Klik op 'Ok'.
Nu staat er onder het geselecteerde vak een verwijzer naar de gewenste bladzijde.




30

Afbeelding toevoegen




Om een afbeelding toe te voegen aan het geselecteerde vak, klikt u op het icoon 'afbeelding invoegen'.

Vervolgens ziet u een venster met alle onlangs gemaakte foto's.

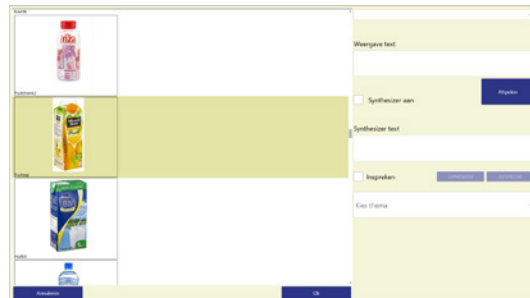


Selecteer de gewenste afbeelding. Ook kan er rechtsboven gekozen worden voor 'USB-stick'.

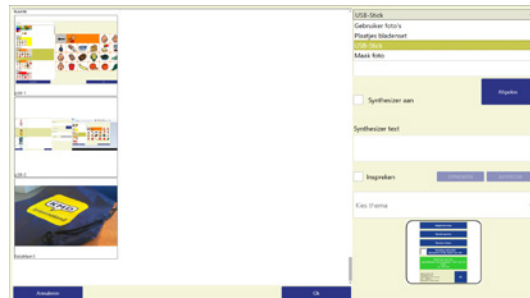




Hierdoor worden de afbeeldingen die opgeslagen zijn op de USB-stick weergegeven en kunnen deze ook toegevoegd worden aan een vak.

Tot slot kunt u ook op dat moment een foto maken die u wilt gebruiken als afbeelding in het vak.

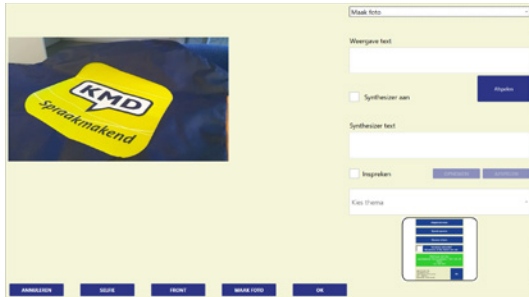


Daarnaast kunt u de kleur van de tekst veranderen, de synthesizer aanzetten met de gewenste spraak en een thema toevoegen. Rechtsonder ziet u een voorbeeld hoe het vak eruit komt te zien.

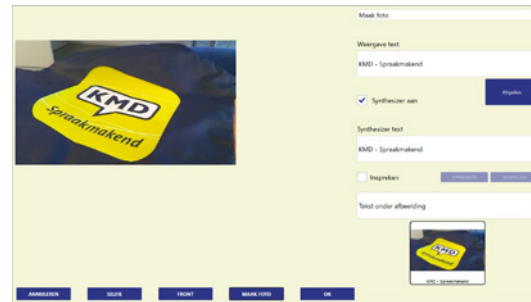

Klik vervolgens op 'Ok' om de afbeelding toe te voegen aan het vak.

Symbol toevoegen



Om een symbool toe te voegen aan het geselecteerde vak, klikt u op het icoon 'symbool invoegen'. Het volgende venster komt tevoorschijn.

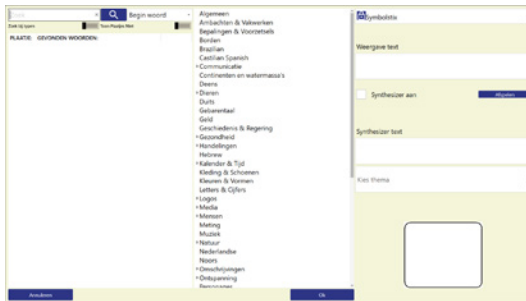


Hier kunt u het gewenste symbool zoeken via de zoekbalk.


Of u kunt via het doorbladeren door de categorieën het gewenste symbool zoeken. Zie de afbeelding rechtsboven.

Om een andere symbooltaal te selecteren, kiest u de gewenste symbooltaal rechtsboven.

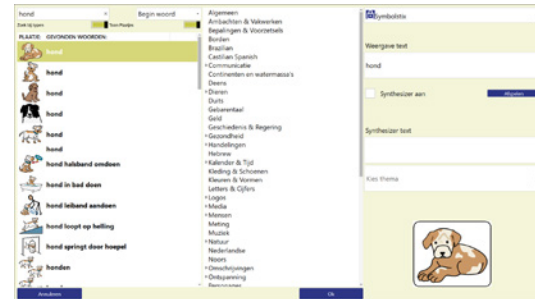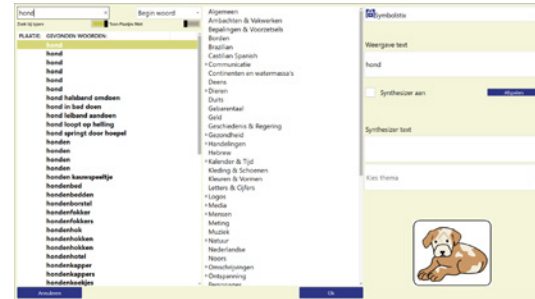

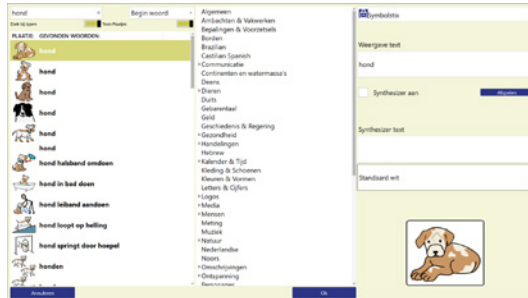


Vervolgens kunt u de synthesizer aanzetten, de tekst veranderen en een thema selecteren. Rechtsonder ziet u een voorbeeld hoe het vak eruit komt te zien.

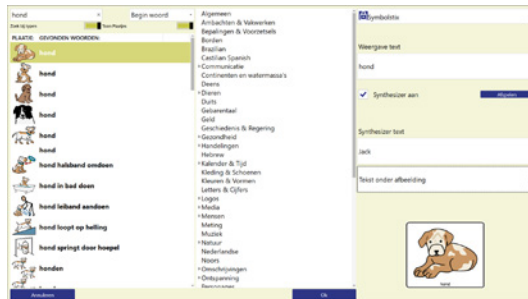

Klik vervolgens op 'Ok' om het symbool toe te voegen in het vak.

Tekst toevoegen

T Indien u alleen tekst wilt invoegen bij het geselecteerde vak, kiest u deze optie.

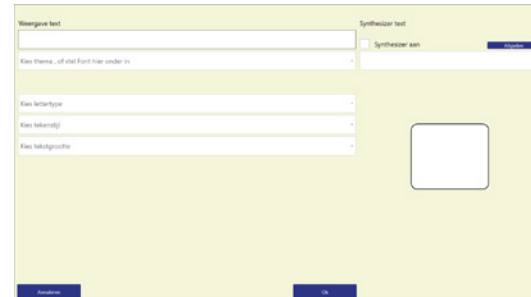


Hierbij typt u wat u graag in het vak wilt zien. Het lettertype, tekenstijl en tekstgrootte kunnen worden aangepast en de tekst kan uitgesproken worden d.m.v. de synthesizer.


Thema toepassen op een vak



Als u het icoon 'thema' kiest, wordt het volgende venster weergegeven.

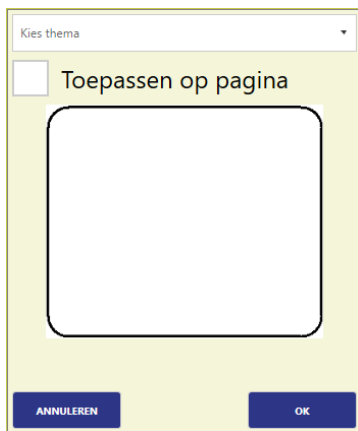

Met deze optie kunt u een bepaald thema toepassen.

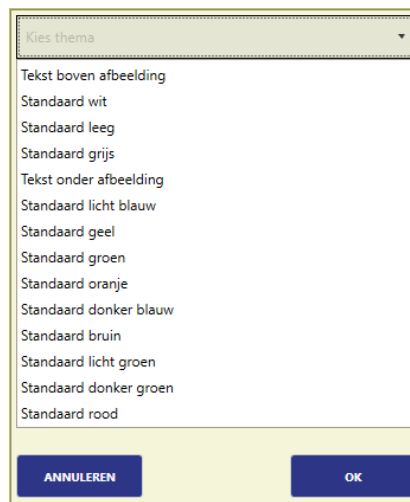



Selecteer het gewenste thema en klik op 'OK'.

Thema toepassen op een hele pagina



Als u het icoon 'thema' kiest, wordt het volgende venster weergegeven (linker afbeelding).

Met deze optie kunt u een bepaald thema toepassen. Om het thema op de hele pagina toe te passen, kruist u de optie 'toepassen op pagina' aan (rechter afbeelding).

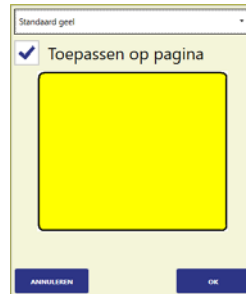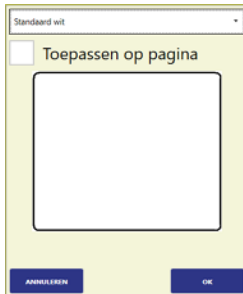

Druk vervolgens op 'Ok'.

Vak dupliceren




Hiermee kunt u vakken kopiëren en plakken. Selecteer het vak dat u wilt kopiëren en druk op het icoon 'kopiëren'.





Selecteer vervolgens de plek waar u het vak wilt plakken.

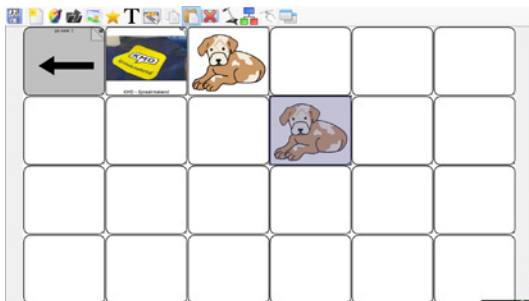

Klik op het icoon 'plakken' om het gekopieerde vak te plakken.

Vak wissen

Om een vak te wissen, selecteert u het vak dat u wilt wissen.



Klik op het icoon 'wissen'. Het vak is nu gewist.




Spraakopname maken


Met deze optie kunt u een vak inspreken.



Klik op het icoon 'audio opnemen'. Het icoon wordt nu donkerblauw. Dit betekent dat de opname functie nu aanstaat.

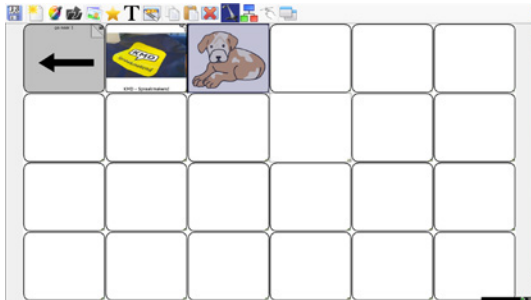

Tik het vak aan dat u wilt inspreken. Vervolgens verschijnt er onderaan een vak die de opname weergeeft (afbeelding rechtsboven).

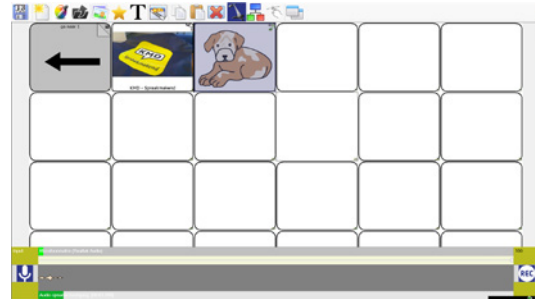

Als u klaar bent tikt u nogmaals op het vak. Het audio-bestand wordt nu herhaald, zodat u de ingesproken boodschap kunt controleren.

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Als u klaar bent met inspreken van verschillende vakken drukt u nogmaals op het icoontje van audio opnemen



Het icoon is nu niet meer donkerblauw en de opname functie is nu uitgeschakeld.

Verwijzervak bewerken

Wanneer u een vak waarin een verwijzer staat wilt bewerken dient u deze actie uit te schakelen. Anders is het niet mogelijk dit vak te bewerken. U schakelt de navigatiefunctie aan en uit door op het icoon 'Navigatie' te klikken. Het navigatie-icoon wordt nu donkerblauw. Dit betekent dat de functie nu is ingeschakeld.



U kunt nu op vakken klikken waar verwijzers onder zitten, zonder dat u wordt doorverwezen.



Om de navigatie uit te schakelen, klikt u nogmaals op het navigatie-icoon. Het icoon is nu niet meer donkerblauw en de navigatie functie is nu uitgeschakeld.



Vak verslepen



Om een vak naar een andere plek te slepen klikt u op het icoon 'slepen'. Het icoon wordt nu donkerblauw. Dit betekent dat de functie nu is ingeschakeld. Houd het vak wat u wilt verplaatsen ingedrukt.



Sleep deze naar de gewenste plek en laat het vak vervolgens los.

Bij verschuiven naar een vak waar al een symbool staat worden beide omgewisseld. Functies en spraak gaan mee bij verschuiven.



Om te stoppen met deze functie, drukt u nogmaals op het icoon. Het icoon is nu niet meer donkerblauw en de navigatie functie is nu uitgeschakeld.

HANDLEIDING - KMD TOGO 11

Ander blad kiezen

Wanneer u naar een specifiek blad wilt gaan, klikt u op het icoon 'bladverwijzer'. Vervolgens wordt dit venster weergegeven.



40

Om het gewenste blad te zoeken, kunt u de naam van het blad intypen in de zoekbalk.



Of u kunt het gewenste blad handmatig zoeken door te scrollen.



Klik vervolgens op 'Ga naar' en u bevindt zich nu in het geselecteerde blad.



Service toegang

Na selectie van het Service icoon in de rechterbovenhoek van het menu verschijnt het volgende scherm.

Hierin kan een code ingevoerd worden waarmee medewerkers van KMD toegang krijgen tot het service menu. Hiermee kunnen ze dieper gelegen instellingen van de ToGo 11 veranderen. Selecteer het pijltje om dit menu weer te verlaten.



Ondersteuning door KMD

Service

KMD biedt u alle noodzakelijke ondersteuning bij de keuze van het juiste hulpmiddel of aanvulling daarop. Daarnaast zorgt KMD dat het hulpmiddel wordt afgeleverd bij de cliënt en optimaal wordt ingesteld. Bij vragen kan KMD u te alle tijden op weg helpen.

Bereikbaarheid

KMD
Klein & Melgert Developments N.V.,
't Holland 24, 6921 GW Duiven.

Tel: 0316 - 268 021
Fax 0316 - 281 160
E-mail: info@kmd.nl
Internet: www.kmd.nl

Voorwaarden handleiding

Deze handleiding beschrijft alle mogelijkheden van de ToGo 11, het is echter mogelijk dat uw ToGo 11 bepaalde mogelijkheden niet heeft. Deze handleiding geeft u geen rechten op deze mogelijkheden.

De ToGo 11 is een product dat steeds aan veranderingen onderhevig is. Het kan dus zijn dat kleine wijzigingen en aanvullingen in het apparaat zijn opgenomen zonder dat deze in de handleiding zijn verwerkt.

© Copyright Klein & Melgert Developments 1987-2019
All rights reserved.

Meegeleverde software mag op geen enkele wijze veeleenvoudigd worden. De meegeleverde software mag alleen gebruikt worden bij de ToGo 11 waarvoor deze software bestemd is.

Op al onze diensten, leveringen, offertes, etc., zijn onze bij het handelsregister te Arnhem gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een kopie daarvan wordt u op eerste verzoek gratis toegezonden.



KLEIN & MELGERT DEVELOPMENTS NV

't Holland 24, 6921 GW Duiven

T 0316 - 26 80 21 E info@kmd.nl | www.kmd.nl

